

Instruktion angående säkerhet och underhåll av individuellt utprovade hjälpmedel (gr 3)

Förvaltning: Social- och omsorgsförvaltningen
Dokumenttyp: Stöd och vägledning
Dokumentansvarig: Medicinskt ansvarig för rehabilitering
Dokumentnamn: AD-madrasser, skummaterial
Utfärdad: 2009-09-08
Reviderad: 2018-10-15
Dnr Än: 2017-189
Dnr SON: 2017-201

AD-madrasser, skummaterial

Läs alltid hjälpmedlets bruksanvisning. Denna instruktion är endast ett komplement till bruksanvisningen. Se bruksanvisning för hjälpmedlets maxvikt. Vid förändrad personvikt, ta kontakt med ansvarig arbetsterapeut/fysioterapeut.

Säkerhet vid användning

- Undersök brukarens hud dagligen. Om rodnad uppstår eller om huden blir skadad, kontakta ansvarig arbetsterapeut.
- För att få bästa effekt ska så lite bäddutrustning som möjligt vara placerad mellan brukaren och madrassen.
- Undvik att madrassen kommer i kontakt med vassa föremål.
- AD-madrass utesluter inte regelbunden lägesändring.
- Säkerhetsavstånd till sänggrind bör beaktas.

Underhåll av hjälpmedel

- Madrass och/eller överdrag rengörs vid behov enligt märkning eller anvisning i bruksanvisningen.