

# Instruktion angående säkerhet och underhåll av individuellt utprovade hjälpmedel (gr 3)

Förvaltning: Social- och omsorgsförvaltningen  
Dokumenttyp: Stöd och vägledning  
Dokumentansvarig: Medicinskt ansvarig för rehabilitering  
Dokumentnamn: Arbetsstol hydraulisk eller elektrisk höjdställbar  
Utfärdad: 2009-09-08  
Reviderad: 2018-10-15  
Dnr Än: 2017-267  
Dnr SON: 2017-201

# Arbetsstol hydraulisk eller elektrisk höjdställbar

Läs alltid hjälpmedlets bruksanvisning. Denna instruktion är endast ett komplement till bruksanvisningen. Se bruksanvisning angående hjälpmedlets maxvikt. Vid förändrad personvikt, ta kontakt med ansvarig arbetsterapeut/fysioterapeut.

## Säkerhet vid användning

- Arbetsstolen ska alltid vara bromsad när man sätter sig och reser sig.
- Bromsfunktionen kan vara nedsatt vid ojämnt underlag.

## Underhåll av hjälpmedel

- Kontrollera att arbetsstolens hjul är lätta att rulla och svänga samt att inget missljud hörs.
- Kontrollera att arbetsstolen höj- och sänkfunktion fungerar.
- Kontrollera att arbetsstolens bromsar fungerar.
- Laddning av batteri på en elektriskt reglerbar arbetsstol ska ske regelbundet, se bruksanvisning samt kontrollera att elkontakter, kablar och sladdar är hela.
- Chassiet rengörs enligt bruksanvisning.