

Instruktion angående säkerhet och underhåll av individuellt utprovade hjälpmedel (gr 3)

Förvaltning: Social- och omsorgsförvaltningen
Dokumenttyp: Stöd och vägledning
Dokumentansvarig: Medicinskt ansvarig för rehabilitering
Dokumentnamn: Arm eller bencykel för aktiv träning
Utfärdad: 2009-09-08
Reviderad: 2018-10-15
Dnr Än: 2017-294
Dnr SON: 2017-201

Arm eller bencykel för aktiv träning

Läs alltid hjälpmedlets bruksanvisning. Denna instruktion är endast ett komplement till bruksanvisningen.

Säkerhet vid användning

- TIPPRISK!
 - Om rullstol används se till att tippskydden är nedfällda.
 - Vid behov, placera kilar bakom rullstolens hjul.
- Se till att brukaren har stadiga skor med halkfria sulor vid träningen.
- Se till att brukaren inte klämmer sig på rörliga delar.
- Placera cykeln mot en vägg om den används som bentränare.
- Tillsyn vid behov, följ de individuella instruktionerna brukaren fått.
- Om brukaren upplever obehag avbryt genast och kontakta ansvarig fysioterapeut/sjukgymnast.

Underhåll av hjälpmedel

- Kontrollera att alla skruvar är åtdragna.
- Kontrollera att handtag/pedaler sitter fast och är hela.
- Kontrollera att cykeln fungerar smidigt och att inga missljud uppstår.
- Rengör med mildt rengöringsmedel.