

Instruktion angående säkerhet och underhåll av individuellt utprovade hjälpmedel (gr 3)

Förvaltning: Social- och omsorgsförvaltningen
Dokumenttyp: Stöd och vägledning
Dokumentansvarig: Medicinskt ansvarig för rehabilitering
Dokumentnamn: Duschstol och fristående toalettförhöjning
Utfärdad: 2009-09-08
Reviderad: 2018-10-15
Dnr Än: 2017-265
Dnr SON: 2017-201

Duschstol och fristående toalettförhöjning

Läs alltid hjälpmedlets bruksanvisning. Denna instruktion är endast ett komplement till bruksanvisningen. Se bruksanvisning angående hjälpmedlets maxvikt. Vid förändrad personvikt, ta kontakt med ansvarig arbetsterapeut/fysioterapeut.

Säkerhet vid användning

- Kontrollera alltid innan användning att toalettförhöjningen/duschstolen står stadigt på underlaget.
- Snubbelrisk finns på förhöjningens ben vid förflyttning till/från fristående toalettförhöjning.
- Toalettlocket på fristående toalettförhöjningen går inte att använda som ryggstöd, men kan förses med band för att hållas på plats.

Underhåll av hjälpmedel

- Kontrollera att ryggstödet sitter ordentligt fastskruvat och/eller att tygryggstödet är helt.
- Kontrollera att clips/sprintar för höjjusteringen är hela och sitter ordentligt fast samt att doppskor finns. Kontrollera att de är hela och ej sitter löst.
- Kontrollera att chassit är intakt, det vill säga att det inte finns några rostangrepp eller sprickor samt kontrollera att sits, ryggstöd och lock är helt.
- Vid rengöring används fuktig trasa och mildt rengöringsmedel, se även bruksanvisning.