

Instruktion angående säkerhet och underhåll av individuellt utprovade hjälpmedel (gr 3)

Förvaltning: Social- och omsorgsförvaltningen
Dokumenttyp: Stöd och vägledning
Dokumentansvarig: Medicinskt ansvarig för rehabilitering
Dokumentnamn: Fast toalettförhöjning
Utfärdad: 2009-09-08
Reviderad: 2018-10-15
Dnr Än: 2017-259
Dnr SON: 2017-201

Fast toalettförhöjning

Läs alltid hjälpmedlets bruksanvisning. Denna instruktion är endast ett komplement till bruksanvisningen. Se bruksanvisning angående hjälpmedlets maxvikt. Vid förändrar personvikt, ta kontakt med ansvarig arbetsterapeut/fysioterapeut.

Säkerhet vid användning

- Kontrollera att plastmuttrar under porslinet är åtdragna och att förhöjningen är väl förankrad på toalettstolen.
- Kontrollera att toalettsits och toalettlock är helt.

Underhåll av hjälpmedel

- Vid rengöring använd fuktig trasa och mildt rengöringsmedel, se även bruksanvisning.