

Instruktion angående säkerhet och underhåll av individuellt utprovade hjälpmedel (gr 3)

Förvaltning: Social- och omsorgsförvaltningen
Dokumenttyp: Stöd och vägledning
Dokumentansvarig: Medicinskt ansvarig för rehabilitering
Dokumentnamn: Lyftsele/Stålyftsele
Utfärdad: 2009-09-08
Reviderad: 2018-10-15
Dnr Än: 2017-278
Dnr SON: 2017-201

Lyftsele/Stålyftsele

Läs alltid hjälpmedlets bruksanvisning. Denna instruktion är endast ett komplement till bruksanvisningen.

Säkerhet vid användning

- Personal som hanterar lyftsele/stålyftsele måste ha kunskap om hur dessa ska hanteras, läs bruksanvisning!
- Det finns stor risk för personskada om fel sorts sele används. Kontakta alltid förskrivande arbetsterapeut när behov av lyft och lyftsele uppstår.
- Kontakta arbetsterapeut vid förändrad vikt, allmäntillstånd eller annat som kan påverka säkerheten kring användandet av lyftsele. Selen kan ha blivit för stor eller för liten.
- Kontrollera att selen som används är förskriven till brukaren.
- Kontrollera alltid att lyftselen är rätt applicerad innan lyftet påbörjas.
- Innan lyftet påbörjas planeras hela förflyttningen till exempel genom att placera rullstolen bredvid sängen.
- Kontrollera att bandöglorna är rätt påkrokade på lyftbygeln och att urkrokningsskydden fungerar. Placera de övre bandöglorna först på lyftbygeln. Vid förflyttning med uppresningslyft ska vadband användas, se bruksanvisning.
- När lyftet påbörjas, stanna upp och kontrollera att bandöglorna är påkrokade på lyftbygeln (testlyft).
- Lyft aldrig brukaren högre från underlaget än vad som krävs, förflytta brukaren i lyften endast korta sträckor, till exempel aldrig mellan olika rum.
- Avbryt lyftet om brukaren har tendens att glida igenom selen eller om selen är felplacerad på lyften.

Underhåll av hjälpmedel

- Kontrollera att lyftselens tyg och sömmar är hela innan lyftet påbörjas.
- Obs! Laga eller ändra aldrig en lyftsele.
- Följ tvättrådet på selens etikett vid tvätt.
- Kontrollera efter tvätt att etiketten är läsbar samt att tyg och sömmar är hela.