

Instruktion angående säkerhet och underhåll av individuellt utprovade hjälpmedel (gr 3)

Förvaltning: Social- och omsorgsförvaltningen
Dokumenttyp: Stöd och vägledning
Dokumentansvarig: Medicinskt ansvarig för rehabilitering
Dokumentnamn: TENS-stimulator för smärtlindring
Utfärdad: 2009-09-08
Reviderad: 2018-10-15
Dnr Än: 2017-281
Dnr SON: 2017-201

TENS-stimulator för smärtlindring

Läs alltid hjälpmedlets bruksanvisning. Denna instruktion är endast ett komplement till bruksanvisningen.

Säkerhet vid användning

- TENS-behandlingen är ett personligt förskrivet hjälpmedel, låna därför inte ut TENS-apparaten.
- Använd endast den elektrodplacering som anvisats av fysioterapeut/sjukgymnast vid delegeringen.
- Om hudirritation uppstår avbryt användandet och kontakta ansvarig fysioterapeut/sjukgymnast.
- Stäng av apparaten innan elektroderna tas bort från huden.
- Använd endast uppladdningsbara batterier i de fall batteriladdare följer med apparaten.
- Utsätt aldrig TENS-apparaten för vatten. Torka av med fuktig trasa om nödvändigt.
- Om TENS-apparaten inte fungerar tillfredställande använd felsökning i instruktionsboken och/eller kontakta ansvarig fysioterapeut/sjukgymnast.
- Dra inte i kablar eller kontakter.
- Kan endast förskrivas för 3 månader; kvarstår behovet är det ett personligt ansvar som brukaren ombesörjer och bekostar.

Underhåll av hjälpmedel

- Kablarna håller bäst om de lämnas anslutna till stimulatorn mellan behandlingarna. Linda inte sladdarna hårt kring stimulatorn, då riskeras kabelbrott.
- Rengör kolgummielektroder enbart med vatten och använd mycket elektrodgel och undvik uttorkning genom att tejpa runt samtliga elektrodkanter.
- De självhäftande elektroderna förvaras på det plastade pappret i slutna påse och kan återfuktas med några vattendroppar vid behov. Om vidhäftningsförmågan är fortsatt nedsatt trots återfuktning byt ut elektroderna.